

Att tänka på vid mättagning


- Mätning bör ske stående men kan även utföras sittande eller liggande om patienten av hälsoskäl inte kan stå upp.
- Vid mätning av omfång skall måttbandet sträckas men inte skära in eller dras åt.
- Längdmåttet avläses med fördel på en måttbräda.
- I annat fall bör mätpunkterna märkas med penna så att längd- och omfångsmått avläses från exakt samma punkt.
- Samtliga längdmått utgår alltid från golvet.

Måttabell – mediven forte

Standardstorlekar		I	II	III	IV	V	VI	VII
Lårstrumpor med häftband	cG	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70
Lårstrumpor med häftband X-vid	cG	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80
Omfångsmått	cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
	cF	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
Mättagning skall om möjligt ske på morgonen innan benen svullnat. I annat fall bör patienten först ha benen i högläge ca 30 minuter.	cE	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
	cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
Utgå alltid från omfångsmått "cB" vid storleksbestämning.	cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
	cB ₁	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
Utgå alltid från omfångsmått "cB" vid storleksbestämning.	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
	cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33

Obs! Om patientens mått inte överensstämmer med någon av standardstorlekarna bör strumporna måttillverkas. Denna måttabell gäller endast vid storleksbedömning av mediven forte.

Omfångsmått längdmått

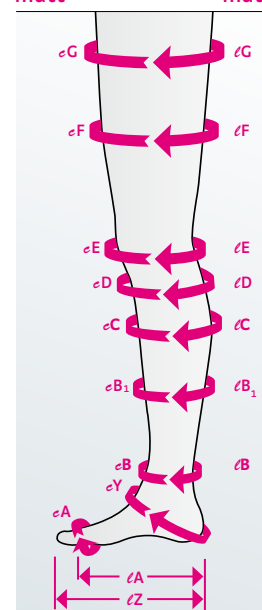

Rekommenderade längdmått för standardstrumpor

AD	Knästrumpa	Normal	39 - 44	Kort	34 - 38
AG	Hellårsstrumpa	Normal	72 - 83	Kort	62 - 71
AGT	Hellår höftdel/midjeband	Normal	72 - 83	kort	62 - 71
AT	Strumpbyxa, grenlängd	Normal	72 - 83	Kort	62 - 71
ŁZ	Fotlängd slutna tå	Skostorlek	36 - 43		
ŁA	Fotlängd öppna tå	Skostorlek	35 - 44		

Tillgängliga standardfärger

	beige
	siena
	marin
	svart

Obs! Mindre avvikelser både nedåt och uppåt kan förekomma beroende på varje enskild patients individuella förutsättningar.

Indikationer

KKL 1 (18-21 mm Hg)
Lätta varicer utan påtaglig ödemtendens, tidiga varicer under graviditet.

KKL 2 (23-32 mm Hg)
För mer påtagliga symptom, uttalade varicer med ödembildning, posttraumatisk svullnad, efter

läkning av mindre sår, efter tromboflebit, för att stabilisera resultaten av skleros behandling och varicotomi, svårare varicer under graviditet.

KKL 3 (34-46 mm Hg)
För alla senkomplikationer efter konstitutionell

eller posttrombotisk venös insufficiens, uttalad ödemtendens, sekundära varicer, atrophie blanche, dermatoskleros och efter läkning av besvärliga sår, särskilt rekurrenta sådana.

KKL 4 (över 49 mm Hg)
Lymfödem och elefantiasis.

Kontraindikationer

Absoluta
Avancerad perifer artär- ocklusion, inkompenenserad hjärtsjukdom, septisk flebit, phlegmasia coreulea dolens.

Relativa
Suppurativa dermatoser, överkänslighet mot mate-

rialet i kompressionsstrumpor, sensoriska störningar i extremiteten, avancerad perifer neuropati, primär kronisk artrit.

Frågor?
Kontakta vår kundtjänst så gör vi vårt bästa för att svara på dina frågor.