



circaid® juxtacures® Ett nytt sätt att bota bensår

Storleken utgår från ett längdmått

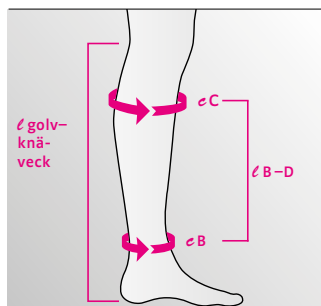


Rekommenderat längdmått			
Storlek	Kort	Standard	Lång
Golv – Knäveck	< 44 cm	44 – 49 cm	> 49 cm
Materialets längd	28 cm	33 cm	38 cm
Art.nr.	JU42709	JU42N09	JU42009
Omfångsmått angivna i cm			
cB-mått	Omfånget där vristen är som smalast		
cC-mått	Omfånget där vaden är som bredast		

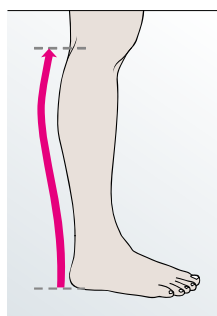

circaid juxtacures finns tre storlekar som bestäms av ett längdmått.

Mäta längdmåttet från golvet upp till knävecket. Följ benets kontur.

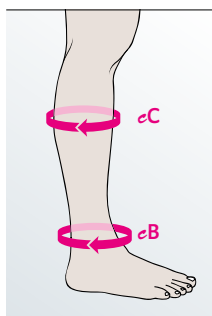

Mät omfångsmåttet där vristen är som smalast (cB) och där vaden är som bredast (cC).

Observera att du mäter ovanpå sår-omläggning och eventuell polstring.



När måtten är tagna är det dags att anpassa circaid juxtacures. Se nedan.

Anpassa och applicera circaid® juxtacures®



Märk ut patientens cB och cC-mått på circaid juxtacures.

cB Runt vristen
cC Runt vaden



circaid juxtacures består av två separata delar. Fäst delarna enligt patientens omfångsmått.



Du hittar cB-måttet längst ned och cC-måttet längst upp på materialet.



Klipp bort överflödigt material med sax. Lämna en marginal på ca 5 cm.

circaid juxtacures är nu klar att appliceras.